



NOTICE D'UTILISATION

DONUTS

Chaussure thérapeutique de série à usage temporaire (CHUT)

INDICATIONS

Morphologie ou pathologies du pied nécessitant une augmentation du volume chaussant de l'avant-pied : œdème, inflammation et rhumatismes, métatarsalgie.

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : polyester et coton
- Doublure : coton et polyester
- Semelle : polyuréthane
- Semelle intérieure amovible en mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)

MODE D'ACTION

Chausson adapté à la morphologie et à la volumétrie du pied :

- Volume chaussant large
- Réglage facile, permettant des variations de volume autour d'un pied inflammatoire, ou oedématié

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée ou une peau à risque de lésion cutanée. En cas de lésion ou de risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port du chausson.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée.

Enlever la semelle intérieure pour aérer le chausson quand il n'est pas porté.

Laver la semelle intérieure à la main.

Laver le chausson en machine à 30°C maximum, sans essorage ou avec un essorage doux.

Si le chausson n'est pas bien rincé, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.

Laisser sécher à l'air libre après avoir remis l'embauchoir pour éviter la déformation du chausson.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas exposer les chaussons à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussons dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.



Carton et papier d'emballage à trier
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe I **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS
Route de Limoges
24800 Thiviers- France
service-client@podowell.com

Version de la notice : Septembre