



NOTICE D'UTILISATION

VENEZIA_D

Chaussure thérapeutique de série à usage prolongé (CHUP)

INDICATIONS

Prévention des plaies, érosions, ulcérations, maux perforants plantaires, douleurs et/ou lésions du pied et des orteils liées à des pathologies neurologiques, vasculaires, métaboliques et orthopédiques avec risque évolutif en termes de douleur, de raideur et de troubles trophiques. Ce produit est indiqué pour les patients diabétiques de type 1 ou 2 présentant des complications neurologiques et/ou vasculaires, y compris avant l'apparition des lésions (en prévention primaire).

Se conformer à la prescription ou aux recommandations d'un médecin.

COMPOSITION

- Dessus : cuir et croûte de cuir (selon la référence)
- Doublure : microfibre de polyester
- Première de propreté : mousse de polyuréthane recouverte de microfibre de polyester (référence PODOMED)
- Semelle : polyuréthane

MODE D'ACTION

Chaussure adaptée à la morphologie et à la volumétrie du pied diabétique:

- Protège le pied vis à vis des éléments extérieurs
- Limite les conflits pied/chaussure tels que les frottements ou l'hyperpression
- Limite la transpiration

PRECAUTION D'EMPLOI ET CONTRE-INDICATIONS

La pointure doit être adaptée à la morphologie du pied du patient.

Ne pas porter la chaussure pied nu, à utiliser de préférence avec des chaussettes en coton. En cas de lésion cutanée ou de peau à risque de lésion, le pied doit être protégé avant le port de la chaussure.

En cas de réaction cutanée, retirer le produit et contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Bien ajuster le réglage pour éviter les frottements et permettre le maintien du pied sans le comprimer. Vérifier que la languette est bien positionnée.

Enlever la semelle intérieure pour aérer la chaussure quand elle n'est pas portée. Laver la semelle intérieure à la main.

Nettoyer la chaussure en cuir à l'aide d'une éponge humide, laisser sécher puis appliquer sur le cuir une crème nourrissante avec un chiffon doux. Nettoyer la chaussure en croûte de cuir avec une petite brosse souple.

Ne pas exposer les chaussures à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant leur utilisation ou leur nettoyage, ne pas utiliser d'alcool, de pommade ou de liquide dissolvant.

Transporter et stocker les chaussures dans un endroit sec à température ambiante. Une humidité excessive peut altérer les matériaux qui les composent.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce produit, le cuir utilisé peut présenter de légères différences d'aspect qui ne doivent pas être considérées comme des défauts.



Carton et papier d'emballage à trier
Chaussures à rapporter dans un point d'apport volontaire
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

Dispositif médical de classe 1 **CE**

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabricant :



FARGEOT Cie SAS
Route de Limoges
24800 Thiviers- France
service-client@podowell.com

Version de la notice : Octobre 2021