

POIRE A LAVEMENT

7 Modèles de Paires avec canules en fonction de leur contenance

- Poire n° CM2 - 80 ml – Canule 7.5 cm
- Poire n° CM4 - 115 ml – Canule 7.5 cm
- Poire n° CM6 - 150 ml – Canule 7.5 cm
- Poire n° CM8 - 200 ml – Canule 7.5 cm
- Poire n° CM10 - 260 ml – Canule 8.5 cm
- Poire n° CM12 - 340 ml – Canule 8.5 cm
- Poire n° CM14 - 450 ml – Canule 8.5 cm

Notice d'utilisation

- 1 – Nettoyez la poire et la canule à l'eau claire avant la première utilisation.
- 2 – Assemblez la poire et la canule
- 3 – Remplissez la poire avec la solution adaptée à vos besoins en pressant la poire. Plongez la canule dans le liquide et relâchez la pression.
- 4 – Introduire la canule dans l'anus et presser de manière à injecter la solution.
- 5 – Laisser le liquide s'évacuer.

Mise en garde

- 1 – Ne pas enfoncer profondément la poire pour éviter toute blessure.
- 2 – Ne pas utiliser de corps gras, ni solvant chlorés.
- 3 – Après utilisation, lavez soigneusement la poire.